

Termék neve

helyi szövetragasztó

Leírás

Ez a termék egy steril, helyileg alkalmazható szövetragasztó, amely a sebszéleket összetartja. Kék színű, átlátszó folyadék. Helyes használat esetén a ragasztó általában 3~10 másodperc alatt kezd kötni és 15~120 másodperc alatt rögzül. A rögzülés után a ragasztó 24 óra múlva éri el maximális szilárdságát.

Specifikáció

1ml/ darab

Alkalmazási terület

Ez a termék kizárólag az állat testfelszínére történő helyi alkalmazásra szolgál, és csak a jó élekekkel rendelkező műtéti metszések párosítására használható, ideértve a minimálisan invazív sebészet során végzett punctura utáni sebeket és a teljes debridement utáni sebeket is. Használható továbbá a felszínes, kisebb sérülések és horzsolások gyógyuló környezetének biztosítására is a felszínes dermisben és annál feljebb. Nem szabad használni testfelület alatti anatómiai területeken és nem helyettesítheti a mély bőrvarratot.

Felhasználási útmutató

1. Vegye ki az alumíniumcsövet és csavarja az applikátort az óramutató járásával megegyező irányba a menetes csőre, amíg az applikátor meg nem húzódik és rögzül a csőhöz. Az applikátor, miután szorosra csavarták, át fog lyukadni az alumínium csővön lévő fólián.
2. A sebet a sebészeti szabványoknak megfelelően kell kezelni. A sebet alaposan ki kell tisztítani, meg kell állítani a vérzést, és mélyen le kell zárni. Az állat bőrét szárazon és tisztán kell tartani a sebszélék körül, biztosítva, hogy a szövetragasztó közvetlenül érintkezzen az állat szövetével a könnyű ragasztáshoz. Szükség esetén szubkután varrássra van szükség, és a szubkután varratot a lehető legközelebb kell elhelyezni a dermishez, hogy lezárja a holt üreget, így az metszés sima és hozzájárul a ragasztáshoz.
3. A bilaterális sebek széleit kézzel vagy műszerekkel szorítsa össze, hogy azok simán és szorosan illeszkedjenek, hogy ne legyen bőrfeszülés. A termékfolyadékkal közvetlenül érintkező kesztyűket vagy eszközöket vazelinrel vagy szilikonolajjal lehet bevonni a véletlen tapadás megelőzése érdekében.
4. Törölje le a vérzést és a váladékot a sebfelületről. A borszéleket összegyűjti, hogy a bemetszés egyenletes legyen, és a bemetszés vonala mentén egyenletesen, vékony réteggel terítse. (Egy adag? szövetragasztó kb. 0,1 ml, amely egy 2-3 cm-es bemetszést képes ragasztani. Ha a bemetszés 2-3 cm-nél kisebb, kérjük, csökkentse a mennyiséget). A túl vastag ragasztás a ragasztó idő előtti repedezését okozza.
5. Tartsa fenn az illesztést 5-15 másodpercig. Miután a szövetragasztó teljesen megkötött és fóliaréteggé vált, folytatható a következő sebszakasz ragasztása. Az applikátorral kerülje a nedves felületekkel való érintkezést. Kenés után ellenőrizze a kenődés lezárását. Szükség esetén kenje újra a szövetragasztót a seb szélén.
6. Ha túlzott mennyiségű ragasztót használ, a szövetragasztót a ragasztó használata után 2 másodpercen belül egyenletesen el lehet kenni egy applikátorral, vagy steril gézzel vagy száraz pamutszivaccsal le lehet törölni, hogy vékony és egyenletes fólia réteget kapjunk. Az applikátor és az alumíniumcső használata után a hulladékot a kijelölt újrahasznosítási helyre helyezze.



1



2



3



4

Elővigyázatossági óvintézkedések

1. A sebészeti eszközökkel való véletlen összeragadás elkerülése érdekében, a szövetragasztóval érintkező sebészeti eszközöket először szilikonolajjal vagy vazelinrel lehet kezelni.
2. Amikor a seb ragasztására használja, a szövetragasztót a seb felületére kell felvinni, de tilos a seb belsejébe felvinni, hogy elkerüljük a sebgyógyulás zavarát.
3. A szövetragasztó nem használható az állatbőr feszítésére, különben a bőrfeszítés növelheti az egyes részeket (például az ízületeket). Ha más eszközöket, például varratot vagy kapcsot használ a seb rögzítésére és lezárására, valamint a bőrfeszültség megszüntetésére, a szövetragasztót használhatja a seb ragasztására.

4. A szövetragasztó nem használható gyakori súrlódási és hosszú távú nedvesítési helyzetben.
5. A szövetragasztó kötőfólia kioldódási ideje általában körülbelül egy hét. Mielőtt a fólia leesik, a sebnek nem szabad hosszú ideig nedves állapotban lennie. A seb gyógyulása alatt száraz védőkötséget lehet használni.
6. Ha az ép bőr véletlenül összeragad, akkor vazelin vagy aceton segíthet a kötés feloldásában;
7. Ez a termék nem érintkezhet a szemmel. Ha a termékkel szembe kerül, azt bő normál sóoldattal vagy vízzel ki kell öblíteni. Ha a ragasztó a szemben marad, haladéktalanul forduljon szemorvoshoz.

Figyelmeztetés

1. Nem használható az a szövetragasztó, amelynek a csomagolása sérült vagy lejárt.
2. A szövetragasztó felbontása előtt ellenőrizze a ragasztó átlátszóságát és folyékonyágát. Ne használja, ha zavaros, ragacos vagy megszilárdult.
3. A szövetragasztó egyszeri használatra szolgál, mivel ragad. Ha nem használta fel teljesen, ügyeljen arra, hogy óvatosan dobja el, hogy elkerülje az összeragadást.
4. Ne használja nedves sebekre. A túlzott nedvesség, például víz vagy alkohol, felgyorsítja a polimerizációt, és túlzott hőt hoz létre.

Csomagolás

Minden dobozban 6 db egyadagos háziállat bőrragasztó található, valamint applikátor és használati útmutató is mellékelve van.

Címkézésen használt szimbólumok



Felhasználható



Naptól távol
tartandó



Szárazon
tartandó



Ne sterilizálja újra



Ne használja újra



Ne használja, ha a
csomagolás sérült



Tételszám



Vigyázat!

Tárolás

A terméket jól szellőző és tiszta környezetben 30°C alatti hőmérsékleten kell tárolni, ahol nincs károsító gáz jelen.

Gyártás dátuma

Kérjük, nézze meg a csomagoláson található részleteket az érvényességi dátummal kapcsolatban.

Felhasználható

15 hónapig

Gyártó

Zhejiang Perfectseal New Material Technology Co., LTD.

cTD: A2-1 OF # 5PLANT, NO.96 MUJIN ROAD, NINGBO HIGH-TECH ZONE, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE.

tel.: +86-574-87564800

fax: +86-574-87564700

email: info@perfectseal.com

Felülvizsgálati dátum: 2021. augusztus 01.