

## Mérleg TTPS-20

### FIGYELMEZTETÉS

- Ne tegye ki a mérleget nedvességnek.
- Ne ejtse le és ne kezelje durván a mérleget.
- Ne merítse a mérleget vízbe.
- Ne tegye ki szélsőséges hőhatásnak.
- Ne terhelje túl a mérleget – ez maradandó károsodást okozhat.
- Ne hagyjon súlyt a mérlegen, ha nincs használatban.
- Soha ne hagyja a babát felügyelet nélkül a mérlegen.
- Cserélje ki az elemeket, ha a kijelzőn „LO” jelenik meg.

### A baba mérleg használata és karbantartása

Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat teljes egészében, mielőtt üzembe helyezi a mérleget.

### Műszaki adatok

Ez a mérleg nagy pontosságú "**strain gauge**" érzékelővel és nagy teljesítményű **CPU-val** (központi feldolgozóegységgel) van felszerelve a pontos mérés érdekében.

- **Mérési kapacitás:** 20 kg
- **Kijelző felbontás:** 10 g
- **Tára funkció**
- **Automatikus kikapcsolás**
- **Alacsony feszültség jelző**
- **Tápellátás:** 2× AAA elem
- **Működési hőmérséklet-tartomány:** 0–40°C
- **Kijelző:** LCD kijelző
- **150 cm-es puha mérőszalag**

### Főbb funkciók

- **ON/OFF/TARE gomb:** Be- és kikapcsolás, tara funkció
- **UNIT gomb:**
  - Mértékegység kiválasztása: kg/lb/oz
  - Hosszú lenyomással váltás az automatikus zárolás és a feloldás között

### Használati útmutató

#### 1. Üzembe helyezés

- Vegye ki a mérleget a csomagolásból.
- Nyissa ki az elemtartó fedelét, és helyezze be az elemeket.
- Helyezze a mérleget egy sík, stabil felületre.

#### Üzemi feltételek:

- **Hőmérséklet:** 10°C - 40°C

- **Páratartalom:** 30% - 75%
- **Légnyomás:** 700 - 1060 hPa

#### **Szállítási és tárolási feltételek:**

- **Hőmérséklet:** 10°C - 40°C
- **Páratartalom:** 5% - 95%
- **Légnyomás:** 700 - 1060 hPa

#### **A baba mérése**

1. Nyomja meg az **[ON]** gombot a mérleg bekapcsolásához. A kijelzőn „0.00” jelenik meg.
2. Nyomja meg a **[UNIT]** gombot a mértékegység kiválasztásához (kg, lb, oz).
3. Helyezze a babát a mérlegre – az LCD kijelzőn megjelenik a súlya.
4. A mérleg kikapcsolásához tartsa lenyomva az **[OFF]** gombot 3 másodpercig.

#### **⚠ FIGYELMEZTETÉS:**

- Biztosítsa, hogy a mérleg stabil és sík felületen álljon a mérés előtt.
- Ügyeljen arra, hogy a baba mozdulatlanul feküdjön a mérlegen.

#### **Elemek használata és behelyezése**

- **Elem típusa:** 2× AAA elem
- Nyissa ki a mérleg hátulján található elemtartó fedelét.
- Helyezze be a két AAA elemet a megfelelő polaritással.
- Zárja vissza az elemtartó fedelét biztonságosan.

#### **Használati és karbantartási tanácsok**

- Helyezze a mérleget egy tiszta, sík felületre.
- A hosszú élettartam érdekében ne tegye ki víznek, szélsőséges hőnek vagy hidegnek.
- Mivel ez egy nagy pontosságú elektronikus mérőeszköz, ne nyomja meg erősen, és ne ejtse le, mert ez károsodást okozhat.
- Ha a mérleg felülete piszkos, tisztítsa meg egy puha ruhával. Ne használjon vegyi tisztítószereket, és ne engedje, hogy víz jusson a mérlegen belülre.
- Ha a kijelzőn helytelen érték jelenik meg, ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően töltöttek-e, és érintkeznek-e a csatlakozókkal.
- Ha az elemeket hosszabb ideig használták, cserélje ki őket, majd próbálja újra.

#### **⚠ Fontos tudnivaló:**

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az ezzel jelölt termékeket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. A megfelelő hulladékkezelés érdekében forduljon a helyi önkormányzathoz vagy hatóságához.

## **Csomagolás**

- A készülékhez mellékelt csomagolás teljes mértékben újrahasznosítható és környezetbarát módon ártalmatlanítható.
- A kartonpapírt igény szerint kisebb darabokra vághatja az újrahasznosításhoz vagy a hulladékkezeléshez.
- A mellékelt polietilén csomagolóanyag nem tartalmaz CFC-ket, és környezetbarát.
- További újrahasznosítási információkért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy illetékes hatósághoz.

**Szabadalmaztatott termék – jogsértés esetén vizsgálat indul.**