

DTS-280 Képképző Rendszer Gyors Használati Útmutató

Használat előtti előkészületek

Tartó és forgókar felszerelése

1. Helyezze a tartót a fém oszlopba.
2. Szerelje fel a képernyőtartót – ajánlott az oszlop alatti műszer tálca csatlakozási pontjára. Két félkör alakú párnát helyezzen a tartó interfészéhez, hogy a képernyőtartó ne csúszkáljon.
- 3-4. Csavarozza fel a képernyőtartót.

(A dokumentum képe itt a tartó és forgókar szerelését mutatja, a csavarok és párnák elhelyezésével.)

Röntgengép felszerelése

- Csúsztassa a tartót a röntgengép nyílásába, majd húzza meg a csavarokkal.
- A szerelés után ellenőrizze a kar mozgékonyágát.

Megjegyzés: A szerelés és szétszerelés során a röntgengépet mindig tartsa kézzel, hogy ne essen le!

Működtetés

Röntgengép felépítése

1. Fogantyú
2. Csúszásgátló markolat
3. Távirányító csatlakozó
4. Töltőcsatlakozó
5. Bekapcsoló gomb és jelzőfény
6. Idő/mód vezérlő gomb
7. Címke
8. Akkumulátor fedél
9. LCD kijelző
10. Expozíciós lámpa
11. Expozíciós gomb
12. Röntgenmező
13. Kúp

LCD funkciók

1. Nagy állat jelzése
2. Nagy állat fogterület
3. Kis állat jelzése
4. Kis állat fogterület
5. Állapot kijelzés: a készülék jelenlegi működését mutatja
6. Akkumulátor állapota: 3 lépcsős kijelzés
7. Digitális mód ikon: a digitális szenzor beállítását jelzi, film módban eltűnik (alapértelmezett)
8. Expozíciós idő kijelzés: a fogak egyes részeire beállított sugárzási idő
9. 3-lépéses idő növelési szint a fog részeihez

Gombfunkciók:

- Elülső gombok: Bekapcsoló, Idő/mód vezérlő gomb
- Hátsó gomb: EXP (expozíció) gomb

Akkumulátor töltés

- Csak a kijelölt töltőt és akkumulátort használja.
- Töltés után tegye az akkumulátort a tárolóba, és ne töltsön újra teljesen feltöltött akkumulátort.
- Ne érintkezzen fémtárgyakkal (érme, kulcs, csipesz) az akkumulátor érintkezőin.

Üzemeltetés

- 1 mp-ig tartsa nyomva a bekapcsoló gombot: a logó megjelenik, a készülék indul.
- Aktív állapotban 1 mp-ig nyomva a gombot: kikapcsolás.

X-ray sugárzási idő táblázat (referencia)

- Különböző távolságok és állatfajok szerint, szenzor és film mód esetén.
- Fontos: szerelés/szét szerelés közben mindig kézzel tartsa a gépet!

ALL-IN-ONE számítógépes rendszer (23,8” érintőképernyő)

Portok és csatlakozók:

1. Bekapcsoló
2-3. USB portok
 2. RFIN port
 3. HDMI port
 4. VGA port
 5. USB port
 6. Vezeték nélküli hálózati port
 7. Hangszóró port
 8. Mikrofon port
-

Digitális intraorális szenzor használata

1. Csatlakoztassa az USB-t a szenzorhoz és a számítógéphez.
2. Dupla kattintás a szoftver indításához.
3. Kattintson az „OK” gombra.

Új eset létrehozása

- Állat neve, fajta, születési dátum, tulajdonos adatai (kötelező mezők narancssárgával).
 - A készülék a fogprofil alapján előkészíti a szenzort.
 - Válassza ki a készítenő képeket, majd a szenzort a megfelelő helyre állítva nyomja meg az expozíciós gombot.
 - Kép ellenőrzése: dupla kattintás a képre, vagy „Read” gomb.
 - Import, export, törlés lehetséges.
-

Gyors jegyzet és diagnózis készítés

- Egy fog kép: válassza ki a képet, írja a gyors megjegyzést, diagnózist, majd nyomtatás vagy e-jelentés exportálás.
 - Több fog kép: Ctrl + kijelölés az összes képhez, majd PRINT/PRINT ALL vagy export.
 - Kórház neve módosítása: jobb felső sarok „Beállítások” ikon.
 - Ellenőrzés befejezése: kikapcsolás, szenzor tisztítása, csomagolás.
-

Digitális szájscanner szoftver

1. Dupla kattintás a szoftver indításához.
2. Új eset hozzáadása.

Négyosztott képernyő összehasonlításhoz:

1. **Patient (Beteg):** adatkezelés, kulcsszavas keresés
2. **Diagnosis (Diagnózis):** fotó, videó, zoom, teljes képernyő, kép beállítások

3. **Comparison (Összehasonlítás):** valós idejű fotózás, négy kép egyidejű összehasonlítás
 4. **Edit (Szerkesztés):** képek annotálása
 5. **Report (Jelentés):** esetkönyv, vizsgálati képek, javaslatok, nyomtatás/átvitel
 6. **Settings (Beállítás):** nyelv, kórház neve, jelentés címe, módosítás
-

Gyártó

Tootoo Meditech Co., Ltd.

Cím: 3A, Phase II, Smart Home, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86-755-28306385

Email: info@newtootoo.com

Web: [www.newtootoo.com:contentReference\[oaicite:7\]{index=7}](http://www.newtootoo.com:contentReference[oaicite:7]{index=7})