

Digitális szájüregi szkennerek – Gyors használati útmutató

A digitális szájüregi szkennerek szoftvere

A digitális szájüregi szkennerek szoftverének elindításához dupla kattintással nyissa meg az asztali ikont.

Digitális szájüregi endoszkópos rendszer funkciói:

- Betegkezelés (Patient Management)
- Képek gyűjtése (Images Collection)
- Képkontraszt beállítása (Image Contrast)
- Kép szerkesztése (Image Editing)
- Jelentés nyomtatása (Report Printing)
- Rendszerbeállítások (System Set)

Dupla kattintás a szoftver ikonra az elindításhoz.

Megjegyzés a képről: Az ábrán a digitális szájüregi szkennerek látható. Egyetlen kattintással fényképet készíthet, hosszú kattintással videót.

Új eset hozzáadása

- Új beteg adatainak felvétele a rendszerbe.
- Négy részre osztott képernyő az összehasonlításhoz.

Megjegyzés a képről: A képernyőn az új beteg adatainak felvételkor látható mezők: Név, Neme, Életkor, E-mail, Telefonszám, Cím, Megjegyzés.

Szoftver funkciók részletesen

1. **Beteg (Patient):** Segíti az orvosokat a betegadatok rendszerezésében. Kulcsszavak segítségével lekérdezhetők a betegek adatai.
2. **Diagnózis (Diagnosis):** A fő funkciók: „fénykép” és „videó”. Egyéb kiegészítő funkciók: nagyítás/kicsinyítés, tényleges méret, elosztás, függőleges/középtengelyes kép, teljes képernyő, videóbeállítások. A készített képek és videók automatikusan mentődnek az alsó bal sarokban található képlista, összehasonlításra és szerkesztésre.
3. **Összehasonlítás (Comparison):** Támogatja a valós idejű felvételt az összehasonlító felületen, négy kép összehasonlítására, a képek közvetlenül menthetők a számítógépre vagy QR-kód segítségével továbbíthatók.

4. **Szerkesztés (Edit):** A képekre annotációk helyezhetők, hogy az orvos könnyebben magyarázhassa a betegvizsgálati elemzést.
5. **Jelentés (Report):** Esetkönyv szerkesztése, betegadatok és valós idejű vizsgálati képek hozzáadása, vizsgálati eredmények és orvosi javaslatok kitöltése, nyomtatás vagy továbbítás.
6. **Beállítások (Settings):** Kiválasztható a kínai vagy angol nyelv, beállítható a kórház neve és a jelentés címe, vagy módosíthatók ezek az adatok.

Megjegyzés a képről: A képen négy szájúregi felvétel látható összehasonlítás céljából.

Gyártó adatai

Tootoo Meditech Co., Ltd.

Cím: 3A, Phase II, Smart Home, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86-755-28306385

Email: info@newtootoo.com

Web: www.newtootoo.com