



TooToo MediTech Co., Ltd.

iRapid-1

Állatorvosi immunfluoreszcens
kvantitatív analízátor

- 180 teszt/óra
- 10–75 µl mintamennyiség
- Teljes vér, szérum, plazma és vizelet vizsgálata
- 7"-os színes érintőképernyő
- Méret/tömeg: 213*243*195 mm / 2,1 kg



Cím: 3A, Phase II, Smart Home, Baolong Street,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kína
Tel.: +86-755-28306385 E-mail: info@newtootoo.com
Web: www.newtootoo.com




Az állategészségügy gyors tempójú világában minden másodperc számít. Az iRapid-1 újraértelmezi a gyorsesztesztelést: olyan megoldást kínál, amely a laboratóriumi eredményekhez hasonlóan megbízható, ugyanakkor egyszerű, mint egy pillanat. Gazdaságokba, rendelőkbe és terepre tervezett, egylépéses tesztkészleteink néhány perc alatt pontos képet adnak az immunállapotról – betanítás nélkül, a költségvetés terhelése nélkül, szobahőmérsékleten tárolva.

Legyen szó járvány megfékezéséről az állattartó telepen, a gazdik aggodalmának oldásáról vagy a távoli területeken dolgozó mobil állatorvosok támogatásáról, az iRapid-1 ott is helytáll, ahol mások nem. A gazdálkodók gyorsabban védik meg állományukat, az állatorvosok jelentősen csökkentik a diagnosztikai költségeket, a menhelyek pedig több állatra terjesztik ki a megelőző ellátást.

Megfizethető kompromisszumok nélkül, kompakt bonyolultság nélkül – ez az a vizsgálat, amely lépést tart az élettel. Mert ha az állat nem tud várni, Önnek sem szabad!

Kezelés

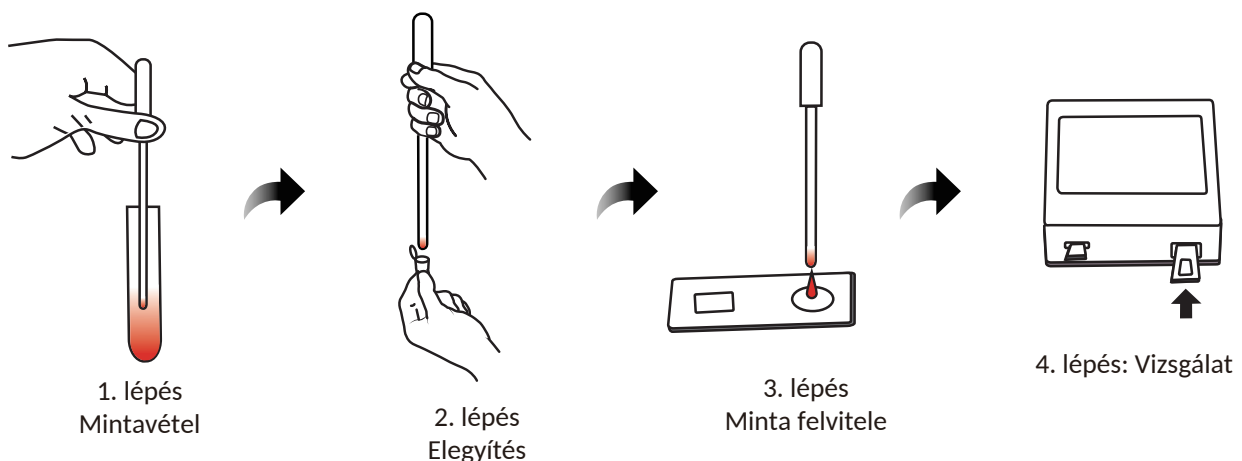



Állítsa meg a járványokat, mielőtt elterjednének! Az egy lépéses kezelésnek és a zord körülmények között is stabil reagenseknek köszönhetően a haszonállatok bármikor és bárhol vizsgálhatók – laboratórium nélkül. Percek alatt pontos állományegészségügyi adatokhoz jut, és megvédheti a megélhetését.

A szerszámosládája éppen könnyebb lett. A kompakt, hosszan eltartható kiszerelés bármelyik terepi készletbe befér. Tökéletes távoli területekre, ahol minden másodperc – és minden fillér – számít!



Változtassa a szorongó várakozást azonnali válasszá! Tévedésbiztos tesztkészleteink semmilyen technikai betanítást nem igényelnek, így arra összpontosíthat, amihez a legjobban ért: a kedvencek ellátására. A megfizethető ár azt jelenti, hogy több megelőző szűrésre mondhat igent – a minőség feláldozása nélkül.

Specifikáció

Vizsgálati elv	Fluoreszcens immunoassay
Áteresztőképesség	>180 teszt/óra (gyors üzemmód)
Mintamennyiség	10–75 µL
Mintatípus	Teljes vér, szérum, plazma és vizelet
Kazetta tárolása	4–30 °C, 24 hónap
Kijelző	7 hüvelykes színes érintőképernyő
Méretek (Sz*Mé*Ma)	213 mm*243 mm*195 mm
Tömeg	2,1 kg
Üzemeltetési környezet	10 °C–30 °C; rel. páratartalom: 25%–70%; 700–1060 hPa
Tápellátás	100–240 V AC, 50/60 Hz, 60 VA



Vizsgálati kínálat

	Paraméter	Mintatípus	Mintamennyiség	Teszt ideje
Gyulladás (kutya és macska)	cCRP	Szérum, plazma vagy teljes vér	10 µL	3 perc
	fSAA		10 µL	3 perc
Szívmarker (kutya és macska)	cNT-proBNP	Szérum, plazma	75 µL	15 perc
	fNT-proBNP		75 µL	15 perc
	ccTnl		75 µL	15 perc
	fcTnl		75 µL	15 perc
	cNT-proBNP/ccTnl		75 µL	15 perc
	fNT-proBNP/fcTnl		75 µL	15 perc
Hormon (kutya és macska)	cProg	Szérum, plazma	75 µL	15 perc
	Kortizol		75 µL	15 perc
	T4 és macska-T4		75 µL	15 perc
	TSH		75 µL	15 perc
	C-RLN (kutya-relaxin)		75 µL	15 perc
Cukorbetegség (kutya és macska)	cHbA1c	Teljes vér	10 µL	5 perc
	fHbA1c		10 µL	5 perc
Hasnyálmirigy-gyulladás (kutya és macska)	cPL	Szérum, plazma	75 µL	15 perc
	fPL			
Trombózisfunkció (kutya és macska)	D-dimer	Plazma vagy teljes vér	plazma: 15 µL teljes vér: 10 µL	5 perc
Veseműködés (kutya és macska)	cCys C	Szérum, plazma	10 µL	10 perc
	fCys C		75 µL	15 perc
	SDMA		75 µL	15 perc
Gyomorműködés (kutya és macska)	HP	Bélsár	75 µL	15 perc
Fertőzések (kutya és macska)	CPV Ag	Bélsár	75 µL	10 perc
	CDV Ag	Szem-, orr- és szájváladék	75 µL	10 perc
	CCV Ag	Bélsár	75 µL	10 perc
	CPV/CCV Ag	Bélsár	75 µL	10 perc
	FPV Ag	Bélsár	75 µL	10 perc
	FCoV Ag	Bélsár	75 µL	10 perc
	FHV Ag	Szem-, orr- és szájváladék	75 µL	10 perc
	FCAV Ag	Szem-, orr- és szájváladék	75 µL	10 perc
	Rotavírus Ag	Bélsár	75 µL	10 perc
	Giardia Ag	Bélsár	75 µL	10 perc
	FelV Ag	Szérum, plazma	75 µL	10 perc
	MP (Mycoplasma) Ag	Szem-, orr- és szájváladék	75 µL	10 perc
	CP (Chlamydia) Ag	Szem-, orr- és szájváladék	75 µL	10 perc
Ellenanyag (kutya és macska)	CDV/CPV/ICH Ab	Szérum, plazma	75 µL	10 perc
	FHV/FCAV/FPV Ab		75 µL	10 perc
	Toxo Ab		75 µL	10 perc
	Veszétség elleni ellenanyag		75 µL	10 perc
	FIV Ab		75 µL	10 perc
Tumormarker (kutya)	CPSE	Szérum, plazma	75 µL	15 perc
	cAFP		10 µL	15 perc
Kullancs által terjesztett betegségek (kutya)	EHR (Ehrlichia) Ab	Szérum, plazma	10 µL	10 perc
	ANA (Anaplasma) Ab		10 µL	10 perc
	LYM (Lyme) Ab		10 µL	10 perc
	Babesia Ab		10 µL	10 perc
Ló	eSAA	Szérum	10 µL	5 perc
	Csikó IgG	Szérum, plazma	10 µL	15 perc
	eProg	Szérum, plazma	75 µL	15 perc