

Víz alatti kutya futópad

Felhasználói kézikönyv



Tartalomjegyzék

Figyelmeztetés..... 2

Bevezetés..... 3

A termék használati útmutatója..... 4

A termék sportüzemmódjai..... 6

FIGYELMEZTETÉS: A futópaddockot kizárólag földelt hálózati aljzatról üzemeltesse.

Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat.

1. A futópaddockot beltérben, nedvességtől távol helyezze el. A futópaddockra nem szabad vizet önteni, és semmilyen idegen tárgyat nem szabad rátenni.
2. Az edzés megkezdése előtt ügyeljen arra, hogy az állaton ne legyen szabadon lógó szíj, szalag vagy szövetség, mert ezek a mozgás közben beakadhatnak.
3. A hálózati csatlakozónak földeltnek kell lennie, dedikált áramkörű aljzatot használjon, és kerülje az aljzat más elektromos berendezésekkel való közös használatát.
4. A balesetek elkerülése érdekében gyermekek tartsanak távolságot a géptől.
5. Kerülje a túlterhelést és a rendkívül hosszú futtatást, mert az a motor és a vezérlő károsodásához vezet, továbbá gyorsítja a csapágy, a futószalag és a futófelület kopását, öregedését. Rendszeresen végezzen karbantartást.
6. Csökkentse a beltéri port, és tartson megfelelő páratartalmat. Kerülje az erős statikus feltöltődést okozó anyagokat, mert ezek zavarhatják az elektronika és a vezérlő normál működését.
7. A használat befejezése után kapcsolja ki a futópaddock tápellátását.
8. A futópaddock használata során gondoskodjon a beltéri levegő keringéséről.
9. Ha úgy érzi, hogy a készülék az adott állat számára nem alkalmas, vagy szokatlan körülményt észlel, hagyja abba az edzést, és kérjen orvosi tanácsot.
10. A terméket kizárólag felügyelet mellett szabad használni, az állat sérülésének megelőzése érdekében.
11. Ne engedje, hogy az állat szabadon mozogjon a futópaddockon, vagy a futópaddock mellett játsszon.

FIGYELMEZTETÉS: A balesetek, illetve a másoknak okozott sérülések elkerülése érdekében tartsa be az alábbiakat:

1. Az edzés megkezdése előtt a futópaddockot fel kell tölteni vízzel, és a vízszintnek 15 cm-t kell elérnie az edzett üveg fölött. Ne használja víz nélkül, mert az az elektromos alkatrészek tönkremeneteléhez vezet.
2. Ne hagyjon az állaton olyan textilanyagot, amely könnyen beakadhat.
3. Ne helyezze a hálózati kábelt forró tárgyak közelébe.
4. Ne engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek a futópaddockhoz.
5. Ne használja a futópaddockot a szabadban, sem kereskedelmi edzőteremben vagy kültéri környezetben.
6. A futópaddock mozgatása előtt feltétlenül áramtalanítsa a készüléket.
7. A készüléket kizárólag szakember szerelheti szét, ellenkező esetben súlyos következmények léphetnek fel.
8. A futópaddock kizárólag 63 A-es áramkörön üzemeltethető.
9. A gép működése közben egyszerre csak egy állat mozoghat a futópaddockon.
10. Ha a mozgás során szédülés, mellkasi fájdalom, hányinger vagy légszomj jelentkezik, azonnal hagyja abba a mozgást, és forduljon a megfelelő trénerhez vagy orvoshoz.
11. A futópaddockot kizárólag felügyelet mellett szabad használni, az állat sérülésének megelőzése érdekében.

Bevezetés

1) Műszaki paraméterek

Megnevezés	Érték
Üzemi feszültség	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Max. terhelhetőség	80 kg
A termék mérete	1580 × 615 × 1000 mm
A kartondoboz mérete	1660 × 680 × 900 mm
Járófelület (H × Sz)	1300 × 470 mm
A motor csúcsteljesítménye	2 LE
Sebesség	0,8–12 km/h

2) Alkatrészlista

Alkatrész neve	Menny.
Termék (alapváz, időzítővel)	1
Szerszámtáska	1
Kézikönyv	1

A termék használati útmutatója

1. Rövid ismertető

A terméket kizárólag a használati útmutató szerint szabad használni.

Futópad-paraméter: sebesség

Sportparaméterek: távolság, kalória, idő, sebesség

2. Kijelzőablakok

Az LCD kijelző a következő funkciókat jeleníti meg:

1. Sebesség
2. Idő
3. Távolság
4. Kalória

3. Gombok

A futópad a fő gombpanel mellett egy további gombpanellel is rendelkezik.


1. Start (indítás) gomb
2. Stop / újraindítás gomb
3. Program gomb
4. Üzem mód („Model”) gomb
5. Sebesség + („Speed+”)
6. Sebesség – („Speed-”)
7. Bal oldali gomb: vízleeresztés („Outer water”).



8. Jobb oldali gomb: fűtés. A fűtés bekapcsolása előtt a vízszintnek legalább 25 cm-rel a futószalag fölött kell lennie.



9. Csap: felfelé forgatva vízleeresztés („Outer water”); lefelé forgatva vízkeringetés („Water cycle”).

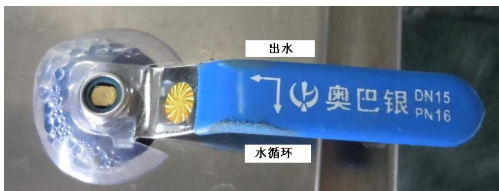

10. A vezérlő használata: hőmérséklet 30–70 °C



A vezérlő a kétjegyű digitális elektromos vízmelegítő-vezérlő továbbfejlesztett változata: egyszerűen kezelhető és könnyen használható. A technikai fejlesztésnek köszönhetően a kezelőfelület megjelenítése szemléletesebb, a szabályozás finomabb. Részletes leírás:

Készenlét: bekapcsolás után a vízmelegítő készenléti módba lép; a négy digitális kijelző a beállításokat és a víz hőmérsékletét mutatja. A „hőmérséklet beállítása” gomb folyamatos nyomva tartásával állítható be a kívánt hőmérséklet.

Bekapcsolt állapot: az „ON/OFF” gomb megnyomásával a vízmelegítő üzemi módba lép, azonnali fűtés-hőmérsékletszabályozással. Használat után az „ON/OFF” gomb megnyomásával a vízmelegítő visszatér készenléti módba.

Időzített állapot: az időzítés az indítási időt állítja be. Készenléti módban nyomja meg a „Timer” gombot az időérték beállításához; a visszaszámlálás befejeztével, a 0 elérésekor a készülék automatikusan bekapcsol.

(Megjegyzés: az időzítő kizárólag készenléti módban használható, bekapcsolt állapotban nem.)

Hibajelzések:

E1: hőmérséklet-hiba (a víz hőmérséklete meghaladja a 90 °C-ot)

E2: szárazon futás hiba

E3: érzékelő szakadása vagy rövidzárata

A termék sportüzemmódjai

3. Paraméterek

Megnevezés	Érték
Feszültség	220 V
Legkisebb sebesség	0,8 km/h
Legnagyobb sebesség	12,0 km/h
Leghosszabb edzésidő idő üzemmódban	99 perc
Legrövidebb edzésidő idő üzemmódban	8 perc
Leghosszabb távolság távolság üzemmódban	99 km
Legrövidebb távolság távolság üzemmódban	0,8 km
Maximális kalóriefogyasztás kalória üzemmódban	999 cal

5. Sportüzemmód

Minden sportüzemmód két előfeltételen alapul: A) a futópad hálózati kábele csatlakoztatva van; B) a biztonsági kulcs be van helyezve.

1. Kézi üzemmód

- Helyezze be a biztonsági zárat – a kijelzőn „0.0” jelenik meg. Nyomja meg a „start/stop” gombot: a „speed” (sebesség) mezőben 3-tól 1-ig visszaszámlálás indul, hangjelzés hallható, és a rendszer elindul.
- A futópad sebessége a „speed+” és a „speed-” gombokkal állítható.
- A futópad számolja a sportparamétereket, és folyamatosan frissíti a kijelzést.
- A sebesség-gyorsgombok megnyomásával a sebesség közvetlenül beállítható; a kijelzett szám megegyezik a gomb számával.
- A „stop” gomb megnyomására a futópad lelassul, majd megáll.

2. Üzemmód („Model”)

- Belépés: nyomja meg a „mode” gombot – a kijelző villogni kezd, és felkínálja az „idő”, a „távolság” és a „kalória” üzemmód közötti választást. A „speed+” és a „speed-” gombokkal állítsa be az edzőmennyiséget, majd a „start” gombbal lépjen be az üzemmódba; ezzel a rendszer elindul.
- A futópad sebessége a „speed+” és a „speed-” gombokkal állítható.