



VA-900

Altató-lélegeztetőgép

- Turbinás meghajtás
- Nulla oxigénfogyasztás
- Intenzív osztályi szintű lélegeztetési módok
- 3 ml-től mért légzési térfogat
- Sokoldalú felhasználás

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE


Fűtató: kis és nagy állathoz
(0–300 ml; 300–1500 ml)

Némítógomb:
riasztáskor
megnyomva 120
másodpercre elnémítja
a hangjelzést

9"-es érintőképernyő: a
lélegzési paraméterek
beállítása és
monitorozása

Zárgomb: képernyőzár a
véletlen érintés ellen

Forgatógomb: a
paraméterek beállítása

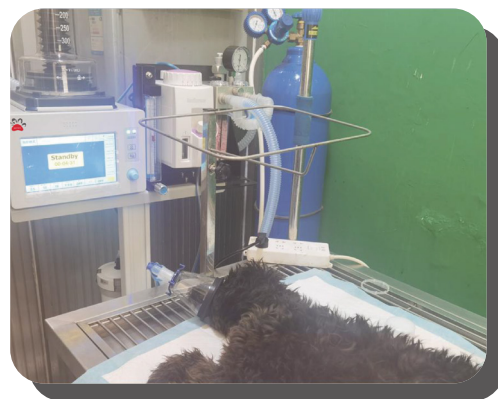

Állatkórház

Légzőrendszer csatlakozója:
a lélegeztetőgépet a
CO₂-elnyelőhöz köti

Elhasznált gáz csatlakozója: ide
köthető az elnyelőtartály a gáz
elvezetéséhez

Ventilátor: itt lép be a levegő,
amelyet a turbinarendszer
hajtógázzá alakít

Hajtógáz bemenete: a hajtógáz
kimenetéhez csatlakoztatva
látja el gázzal a fűtatót

Szoftver-
frissítő
USB-port

Áramlásérzékelő csatlakozója:
az áramlási paraméterek
monitorozása

Tápkábel
csatlakozója


Hálózati
kapcsoló

Hajtógáz kimenete: a fűtató
működéséhez szükséges
gázt biztosítja

Ártalmatlan elhasznált
gáz kimenete





Tudományos kutatás

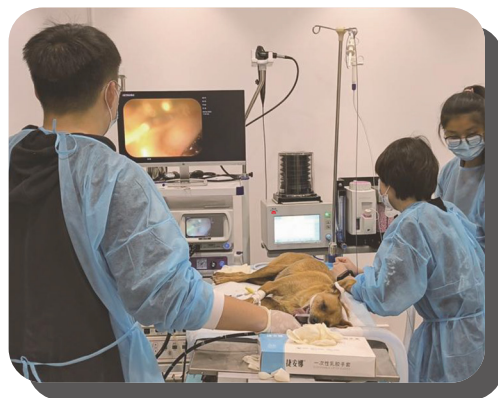

Állatlaboratórium



Oktatási intézmény

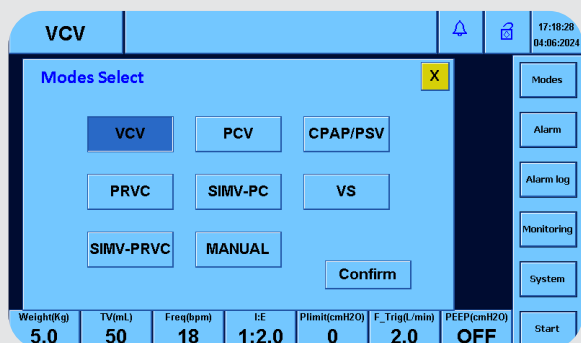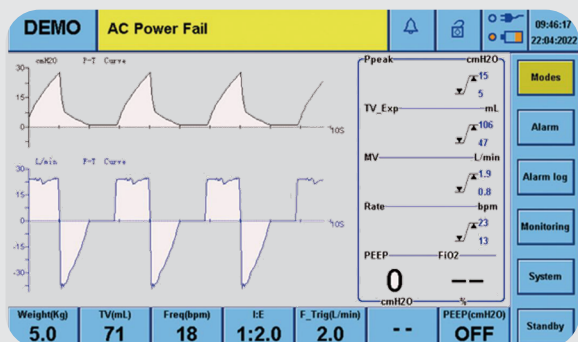

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Turbinás meghajtás – a lélegeztetéshez nincs szükség oxigénforrásra
- Több légzési üzemmód; az intenzív osztályi szintű lélegeztetési módok biztonságosabbak és kíméletesebbek az állatok számára
- 3 ml-től mért légzési térfogat: pontos lélegeztetés, a kisállatok számára is kíméletes
- A paramétereket az állat testtömege alapján automatikusan kiszámítja
- 9"-es HD érintőképernyő
- Több mint 20 riasztási esemény, állítható riasztási hangerő, gyorsan visszakereshető riasztási előzmények
- A hullámformák és hurokgörbék szabadon kombinálhatók a könnyebb munkáért

Paraméterek

Meghajtás	Turbinás, elektronikus vezérléssel
Lélegeztetési módok	VCV, PCV, CPAP/PSV, PRVC, SIMV-PC, VS, SIMV-PRVC, MANUAL
Fújtató	0–300 ml; 0–1500 ml
Hullámformák	nyomás, áramlás, térfogat, kilégzésvégi
Hurokgörbék	nyomás-térfogat / nyomás-áramlás / áramlás-térfogat
Légzési térfogat	gépi vezérlés: 3–1600 ml
Kézi	5–1600 ml
Légzésszám	1–100/perc
I:E	9,9:1 – 1:9,9
Belégzési idő	0,1–10,0 s
Belégzési szünet %	0–50%
PEEP	KI; 3–20 cmH2O
Nyomástámogatás	0–60 cmH2O
Nyomásvezérlés	5–60 cmH2O
Áramlástrigger	0,5–20 l/perc
Nyomástrigger	-1 – -20 cmH2O

TooToo Meditech Co., Ltd.

Cím: 3A, Phase II, Smart Home, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kína

Tel.: +86-755-28306385

WhatsApp: +86 136 3258 4549

E-mail: info@newtootoo.com

Web: www.newtootoo.com